


NOTICE POUR CHEVILLE MULTIAXIALE 1D111
INSTRUCTIONS FOR MULTIAXIS ANKLE 1 D 111
ANLEITUNG FÜR MEHRACHSIGES KNÖCHEL 1 D 111
INSTRUCCIONES PARA TOBILLO MULTIAXIAL 1D111

I - MONTAGE / MOUNTING / MONTAGE / MONTAJE

1D41, 1D45, 1K207, ou autre adaptateur pyramidal femelle
or another female pyramidal adapter
 oder ein anderer weibliche Pyramidadapter
 u otro adaptor piramidal hembra

1A101, 1A21, 1A111, 1A128, ou autre pied
or another foot
 oder ein anderer Fuß
 u otro pié

Couple de serrage = 22 Nm
Tightening torque value = 22 Nm
 Anzugsmoment = 22 Nm
 Par de fuerza = 22 Nm

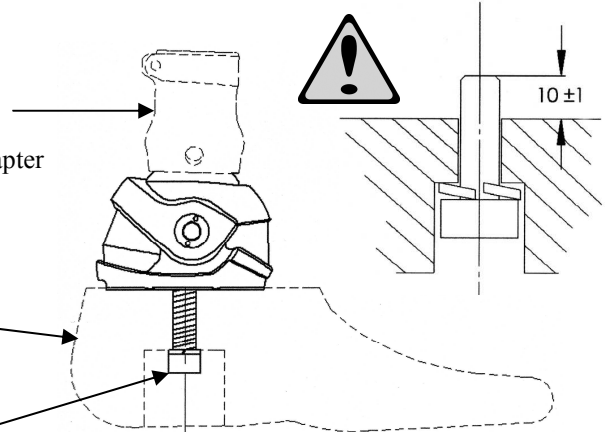


II - UTILISATION / USE / VERWENDUNG / UTILIZACION

Patients moyennement actifs
Moderately active patients
 Mittel aktive Patienten
 Pacientes de actividad moderada

Patients actifs
Active patients
 Aktive Patienten
 Pacientes activos

Patients d'un poids maximum de 100 kg
Patients up to 100 kg
 Patienten bis zu 100 kg
 Pacientes de un peso máximo de 100 kg

III - CHANGEMENT DES AMORTISSEURS / REPLACEMENT OF DAMPERS / WECHSEL DER STOßDÄMPFER / CAMBIO DE LOS AMORTIGUADORES

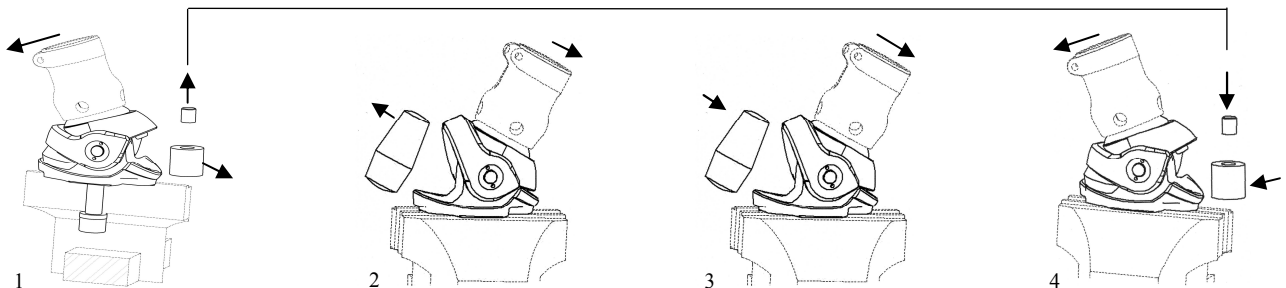


		REF.
HARD	Gris Grey Grau Gris	EE009
MEDIUM	Noir Black Schwarz Negro	EE008
SOFT	Beige Beige Beige Beige	EE007
EXTRA SOFT	Brun Brown Braun Marron	EE013

		REF.
HARD	Ivoire/Ivory Elfenbein- farben Marfil	EE010-3
MEDIUM	Bleu Blue Blau Azul	EE010-2
SOFT	Brun Brown Braun Marron	EE010-1

Kit de réglage 1D11150
Adjustment kit 1D11150
 Einstellbausatz 1D11150
 Piezas de ajuste 1D11150

EE010-2
 EE010-3
 EE009

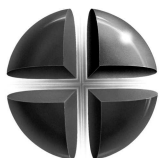

HANDICAP TECHNOLOGIE

PROTEOR

6, rue DE LA REDOUTE - Z.I. SAINT-APOLLINAIRE
 B.P. 37833 - 21078 DIJON CEDEX - FRANCE
 PHONE : +33 3 80 78 42 10 - FAX : +33 3 80 78 42 15
 ht.orthopedie@proteor.com - www.proteor.com